


Használati utasítás - Termo palack, úrtartalom 1,5 l

1. Készítsen elő körülbelül 50 °C-os meleg vizet. Ne használjon forró vizet vagy olyan vizet, amely égési sérüléseket okozhat. Csavarja le a kupakot, és lassan tölts fel a termo palackot forró vízzel a térfogatának $\frac{3}{4}$ -éig. Feltöltéskor tartsa a termo palackot forró vízzel a nyakánál fogva, függőleges helyzetben.
2. Szabaduljon meg a felesleges levegőtől úgy, hogy lassan megdönti a forró vizes palackot, amíg meg nem látja a vizet a palack nyakában. A kényelmesebb manipuláció érdekében helyezheti a melegvizes palackot egyenes felületre is.
3. Óvatosan csavarja rá a kupakot, fordítsa fel a palackot a dugóval lefelé, és ellenőrizze, hogy jól zár-e. Ezután tegye a védőhuzatot a palackra. A termék kiváló minőségű gumiból készült, amely kiváló hőtani tulajdonságokat garantál, a huzat pedig kényelmet biztosít használat közben.

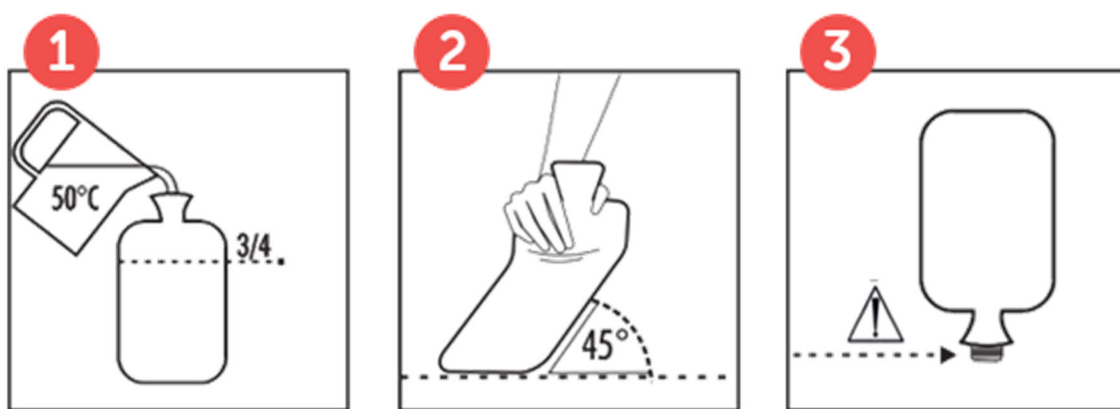

A termofór palack gyógyászati segédeszköz. A huzat valódi birkagyapjából vagy poliészterből készült. Ha a huzat szennyezett, csak kézzel mossa ki, szappannal és vízzel, legfeljebb 30°C-os hőmérsékleten. Időnként öblítse ki a gumiból készült palackot szappannal és vízzel. Ne használjon fertőtlenítőszereket.

Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a palackot. Kerülje a forró vizes palackkal való hosszabb közvetlen bőrkontaktust a huzat nélkül. A palack soha nem lehet 100%-osan tele vízzel!

Ne üljön rá a termofór palackra, ne tegyen rá nehéz tárgyakat. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a forró palackba vagy annak a tetejére. Használat előtt ellenőrizze a termék kopását vagy mechanikai sérülését. Ha valamelyik része megsérül, dobja ki a terméket. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezelje a hulladékot.

Megjegyzés: A 70 °C feletti hőmérsékletű forró víz használata lerövidíti a melegvizes palack élettartamát, károsíthatja azt, és égési sérüléseket okozhat. Ne melegítse mikrohullámú sütőben. Tartsa be a használati utasítást.

Kiváló minőségű természetes gumiból készült, barázdált falú. Terápiás és megelőzési célokra használják a test felmelegítésére és a fájdalom enyhítésére.

Használat előtt olvassa el ezt a használati útmutatót, és kövesse az utasításokat.